



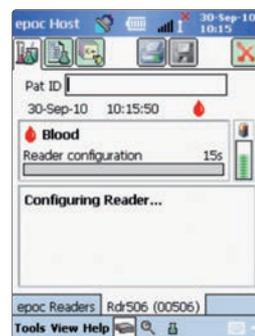

Краткое руководство



1 Включить ерос Ридер и ерос Хост.

2 Программа на ерос Хосте отобразит страницу входа. Введите действительный логин и пароль, и нажмите кнопку Login (используя либо клавиатуру, либо сканер штрих-кодов).

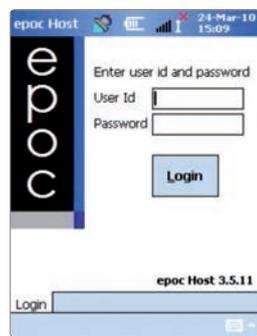

3 Выбрать нужный Ридер двойным нажатием на его иконке. Начать процедуру анализа, подключив Хост к Ридеру .

4 Аккуратно вставить тест карту в слот для карт синей маркировкой вверх и сенсорным модулем к Ридеру. Вставлять карту одним плавным легким движением так, чтобы корректно считался штрих-код на карте.

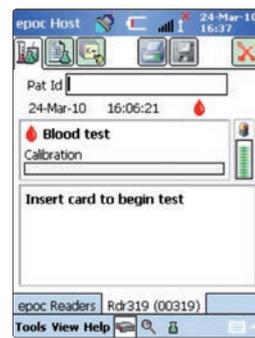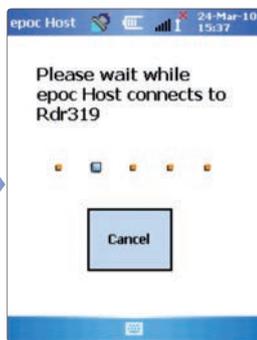

Внутренний QC включается автоматически (прибл. 15 сек). После этого Ридер и Хост готовы к началу анализа.




После вставки карты ~ начинается фаза калибровки (165 сек). После ее завершения Хост оповещает о том, что образец может быть введен.

5 Выбрать вкладку Test Information на экране Ридера, чтобы ввести информацию о пациенте. (Администратор может требовать ввода типа образца и показателя разбавления крови).

6 Ввести образец крови (92 мкл)

Внимание: У вас есть 7.5 мин (450 сек) на ввод образца крови, иначе потребуется вставить другую тестовую карту.

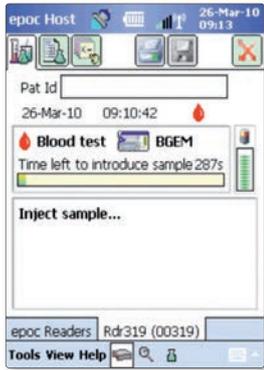


Опционально: капиллярные трубки.

7 Ридер автоматически анализирует образец. Анализ производится в течение 35 секунд.

8 Индикатор статуса анализа Ридера загорится зеленым, указывая на то, что Ридер готов к выполнению следующего анализа. Для выполнения следующего анализа повторить данную процедуру. (Начало нового анализа сохраняет результаты предыдущего. Изменения этого анализа станут невозможны).

6a Держать шприц вертикально между кончиками пальцев и большим пальцем.

6b Используя слабое давление зафиксировать люэровский наконечник шприца в центре порта для ввода образцов крови на тест карте. Повернуть шприц на ¼ оборота, чтобы обеспечить плотную посадку.

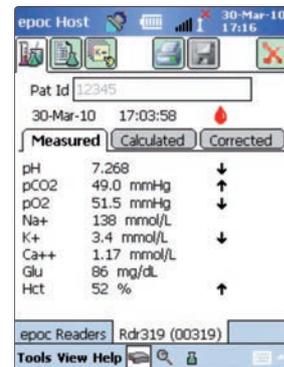

6c Сохраняя давление использовать указательный палец другой руки, чтобы опускать поршень шприца одним плавным, непрерывным движением до сигнала к прекращению.

9 После завершения всех анализов на Ридере и внесения всех записей, анализ и экран Ридера закрывается нажатием красной кнопки справа сверху. (Отключение Ридера не влияет на подключение или статус анализов других Ридеров, ранее обнаруженных или подключенных).

