



Капиллярная трубка ерос® Care-Fill™ Инструкция по применению

При извлечении трубки из упаковки

- Не удалять, не перемещать и не нажимать на поршень
- Не удалять переходник


После извлечения из упаковки

- Держать за **синюю полосу**
- Не держать и не прикасаться к поршню




Шаг 1 Забор крови

- Держать за синюю полосу
- Держать горизонтально, направив трубку в сторону места прокола, и соприкоснуться с кровью
- Наполнять трубку пока кровь не достигнет белой перегородки

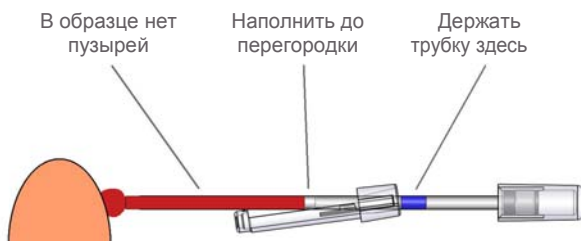

Шаг 2 Подготовка к введению образца

- Удерживая трубку за синюю полосу и направляя трубку вверх:
 - > Передвинуть переходник к концу трубки и вставить ее в переходник
 - > Надавить на трубку до щелчка, чтобы она села не место

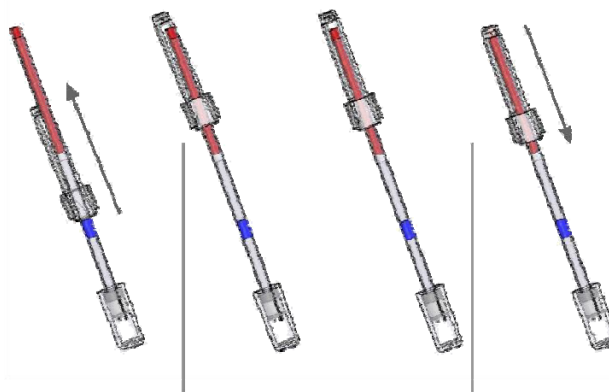

Шаг 3 Введение образца пациента

- Удерживая трубку за больший конец переходника, вставить ее в порт тестовой карты, повернув на ¼ оборота для надежности.
- С помощью пальцев другой руки до конца вдавить поршень одним движением
- Не извлекать, пока не прозвучит сигнал от ридера

